

# FINGERTIP Pulse Oximeter

品番 PO-001-BK

## 動脈酸素飽和度・脈拍数測定装置

### 取扱説明書

本製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。安全かつ適切にご使用頂くため、本書をお読みの上で用法を守って正しくお使い下さい。ご使用前に必ず「安全上の注意」をお読みください。また、いつでもお読みいただけるように大切に保管して下さい。

#### 【内容】

- 本体
- 本説明書
- ストラップ



#### ■製品仕様

酸素濃度 (SpO2) / SpO2範囲: 70~99%  
SpO2解像度: 1% / SpO2精度: ±2%

#### ■パルス

パルス周波数範囲: 30bpm~240bpm  
パルス分解能: 1 bpm  
脈拍数の正確さ: ±1%

#### ■使用上の注意

- 本製品は一般的な健康維持のみを目的としたものであり医療目的で使用・判断するためのものではありません。
- 本製品はスポーツ・一般的な健康管理のための製品であり、医療機器ではありません。
- 本製品を医療目的で使用しないでください。
- 多少の誤差が生じる場合がありますので、取引または証明用として使用することはできません。
- 動作温度/湿度以下または以上の場所で使用すると、誤差が大きくなり、作動しない場合があります。
- 挟んですぐには正確な数値が測定できません。20~30秒後の結果を参考にしてご使用ください。
- 本製品は呼吸を測定する機器ではございません。

安全上の注意 ご使用前に必ずお読みください。

#### ▲ 警告

- 異常を感じたら、直ちに使用を中止し、電源をOFFにしてください。
- 子供や取り扱いに不慣れな方に使わせたり、幼児に触れさせたりしないでください。
- 分解・修理・改造しないでください。
- 水まわり、風呂場など水のかかる場所では絶対に使用しないでください。
- 濡れた状態で使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使用したり、向きを間違えて入れたりしないようご注意ください。
- 可燃性ガスの近くや高濃度酸素下では絶対に使用しないでください。

#### ▲ 注意

- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温多湿な場所には置かないでください。
- 直射日光の当たる場所は避けて保管して下さい。
- 電磁波を発生する機器や電波を発生する機器（電子レンジ・携帯電話など）の近くでは使用しないでください。誤作動や故障の原因となります。

#### ■本体各部説明



#### ■電池を入れてご使用ください。

- ① 背面の電池ボックスのふたを下にスライドして開きます。
- ② 電池ボックスに単4形アルカリ乾電池×2 (別売) を入れ、ふたを元に戻してください。




#### ▲ 注意


- 電池の＋の向きを正しく入れてください。
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式の電池・マンガン電池はご使用いただけません。

#### ■測定する

- ① 機器のカバークリップをつまみ、測定口に対象を入れます。この時、対象はまっすぐ奥までしっかりと差し込んでください。
- ② カバー部分を閉じ、電源ボタンを押して測定を開始します。数値が安定する約20~30秒後の結果を参考にご使用ください。

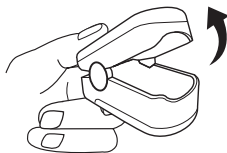

- ③ 測定終了後は、カバークリップをつまんで測定口から対象を取り出します。約8秒後に自動で電源がOFFになります。

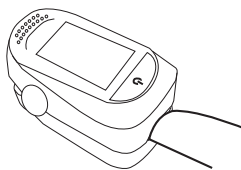

▲ 以下のような場合には正しく測定できません。をご確認の上、正しく測定を行なってください。

- ディスプレイの向きを変更する  
ディスプレイが点灯している状態で、電源ボタンを短く1回押すと、押す毎にディスプレイ表示の向きが回転します。

#### ■ご使用上の注意

モニターの色合いによって実際のものとは色が異なる場合があります。

#### ▲ 以下のような場合には正しく測定できません

- 対象や機器が冷たい  
対象や機器が冷たいと測定できません。  
→ 対象が冷たい場合には対象を温めてから測定してください。  
→ 機器が冷たい場合には暖かいところで機器を少し温めてから測定してください。
- 動いている状態  
動いている状態では正常に検出できません。  
→ 測定中は機器を動かさないようにしてください。  
→ 安静な状態で測定してください。
- 光が対象にあたらぬ  
機械内部の光が対象に当たらない状態では正常に測定できません。  
→ 対象が汚れていたり、何かに覆われている状態または対象に色素のついた液体やクリーム等が塗布されているでは正確に測定が行えない場合がございます。  
→ 太陽光等強い光があたっている状態では正確に測定が行えません。

#### ■製品保証につきまして (ご購入日より6ヶ月)

本製品をご家庭用として、取扱説明書や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証期間・規定により無償修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。また、初期不良の場合等もご購入時のレシートや明細等は、保証開始日の確認のため大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。ご購入時のレシートや明細等がない場合は、保証致しかねますのでご了承ください。

#### Willcom Co., Ltd. ウィルコム株式会社

神奈川県横浜市金沢区福浦 2-11-2

お客様相談室 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祭日 弊社指定休業日を除く

TEL.045-370-8090 ※通話料はお客様負担となります。

MAIL:contact@willcom-co.com

http://www.willcom-co.com/